


# فهم قناع التنفس المرن الخاص بك

سبتمبر 2023

## جهاز تنفس رُبعي مرن ذو قناع وجه

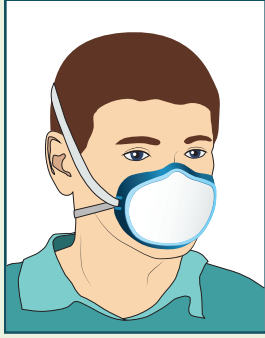

• يغطي أنفك وفمك، ويمنع التسرب بين ذقنك وأسفل شفطك

• عامل الحماية المعين (APF) = 5

• يمكن أن يحتوي على صمام زفير أو لا يحتوي على صمام

• يحمي من الجسيمات أو الغازات أو الأبخرة عند تزويده بالمرشّح أو الخرطوشة المناسبة\*

## جهاز تنفس مرن نصفّي ذو قناع (EHMR)

• يغطي أنفك وفمك، ويمنع التسرب تحت ذقنك

• 10 = APF

• متوفر بأحجام متعددة لتناسب مجموعة متنوعة من المستخدمين

• جهاز EHMR مزوّد بصمام زفير


- يدخل نفسك المستنشّق من خلال المرشّح أو مادة الخرطوشة ويخرج نفس زفيرك غير المرشّح من خلال صمام الزفير
- يزيد صمام الزفير من الراحة عن طريق تقليل مقاومة التنفس، وإزالة الرطوبة، وتقليل تركيزات ثاني أكسيد الكربون داخل جهاز التنفس
- يحمي من الجسيمات أو الغازات أو الأبخرة عند تزويده بالمرشّح أو الخرطوشة المناسبة

• جهاز EHMR غير مزوّد بصمام زفير

- يدخل نفسك المستنشّق من خلال مادة المرشّح ويخرج نفس زفيرك من خلال نفس المرشّح
- يحمي من الجسيمات فقط
- لا يمكن استخدامه مع خراطيش الغاز أو البخار

• جهاز EHMR مع مرشّح مزوّد بصمام الزفير

- يدخل نفسك المستنشّق من خلال مادة المرشّح ويتم ترشيح نفس زفيرك بعد مروره عبر صمام الزفير
- يحمي من الجسيمات أو الغازات أو الأبخرة عند تزويده بالمرشّح أو الخرطوشة المناسبة\*

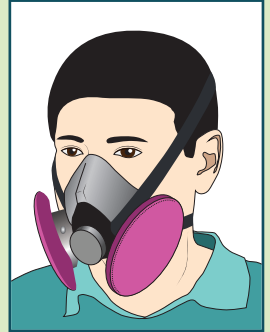

جهاز EHMR مزوّد بصمام زفير



جهاز EHMR غير مزوّد بصمام زفير



جهاز EHMR مع مرشّح مزوّد بصمام الزفير

## جهاز تنفس مرن كامل ذو قناع وجه

• يغطي وجهك بالكامل، من خط الشعر تقريباً إلى أسفل الذقن، ويوفر حماية للعيون


• 50 = APF†

• متوفر بأحجام متعددة لتناسب مجموعة متنوعة من المستخدمين

• يحتوي على صمام زفير

• يدخل نفسك المستنشّق من خلال المرشّح أو مادة الخرطوشة ويخرج نفس زفيرك غير المرشّح من خلال صمام الزفير

• يحمي من الجسيمات أو الغازات أو الأبخرة عند تزويده بالمرشّح أو الخرطوشة أو الحاوية المناسبة

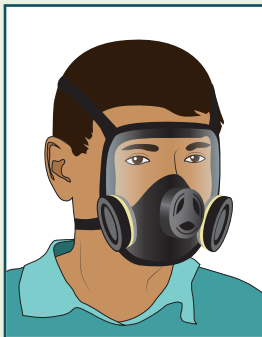

جميع الرسوم التوضيحية  
مقدمة من NIOSH